

FORMADES

SCHNELLEDESINFEKTION



praktisches Flowpack

VAH*

begrenzt viruzid PLUS

PLUS PURE WIPES

Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen

- frei von Aldehyden
- gebrauchsfertige, getränkte Tücher
- auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anzuwenden
- Tuchgröße: 20 x 23 cm

Einsatzbereich

Geeignet zur Schnelldesinfektion von allen alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid / Levurozid (hohe Belastung)	1 Min.	EN 16615, EN 13727, EN 13624
Tuberkulozid (geringe Belastung)	1 Min.	EN14348
Begrenzt viruzid PLUS	1 Min.	EN14476
Mykobakterizid (hohe Belastung)	5 Min.	VAH-Methode 9

Wirkstoffe

100 g enthalten:
50,0 g Ethanol

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
Achtung; GHS02

Hinweise

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett

*beim VAH angemeldet (Stand 04/2021)

Gebinde	Inhalt	VE	Art.Nr.	PZN
Flowpack	80 Tücher (20 x 23 cm)	12 x 80	65703	16928997

BAuA-Reg. Nr. N-98410

pH 0 2 4 6 8 10 12 14

CE 0044 MD

Stand 04/2021

Alle Angaben unserer Produktdatenblätter entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Weitere Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb durch:
unizell Medicare GmbH
Pohnsdorfer Str. 3
23611 Bad Schwartau

Telefon: 0451 - 39 89 00
Telefax: 0451 - 39 39 93
E-mail: info@unizell.de

unizell

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel.: +49 (0) 6251 866980-0